



Ortho Lab

We create beautiful smiles

Instructies voor de Schwartz

Vandaag heb je een nieuwe beugel gekregen, de Schwartz.
Je leest hier hoe je ermee omgaat.

Hoe doe je de beugel in?

Neem de beugel met twee handen vast en plaats de beugel in de onderkaak.
Druk met je handen de beugel bij de kiezen stevig aan.

Hoe doe je de beugel uit?

Pak de beugel met twee handen aan de zijkant aan de draden vast en duw omhoog. Doe dit voorzichtig, anders kan de beugel stuk gaan.
Doe dit niet met je tong!

Hoe maak je de beugel schoon?

Poets één keer per dag de beugel met tandenborstel en tandpasta.
Bewaar je beugel in het beugelbakje of in een glas water.

Let op!

Draag de beugel minimaal 16 uur per dag, bij voorkeur 24 uur per dag! Met deze beugel kun je **NIET** eten! Tijdens het sporten je beugel uitdoen. Spoel en droog de beugel af. Neem je beugel altijd mee tijdens de controles. Neem ook, als je beugel stuk is, je laatste modellen mee.

