

Anweisungen für den Damon-Retainer

Gratuliere! Heute hast du das letzte Gerät deiner Behandlung bekommen. Es ist ein Retentionsgerät: Der Damon-Retainer, präzise angefertigt in unserem Labor. Hier erfährst du, wie du das Gerät richtig anwendest, damit alles gut klappt.

Wie wird das Gerät eingesetzt?

Fasse das Gerät mit beiden Händen an beiden Seiten an und schiebe es über die Zähne im Oberkiefer. Danach vorsichtig zubeißen bis überall Kontakt ist. Sorge für die richtige Position und Vorsicht beim Zubeißen!

Herausnehmen:

Öffne den Mund. Das Gerät bleibt entweder oben oder unten auf den Zähnen sitzen.


Jetzt seitlich mit beiden Hände anfassen und vorsichtig abnehmen.

Wichtig ist, dass du es langsam und gleichmäßig tust. Nie das

Gerät vorne runterziehen, dann

machst du es kaputt und eine

Reparatur wird teuer. Nach dem Herausnehmen mit kaltem Wasser abspülen und in der Zahnspangendose aufbewahren.

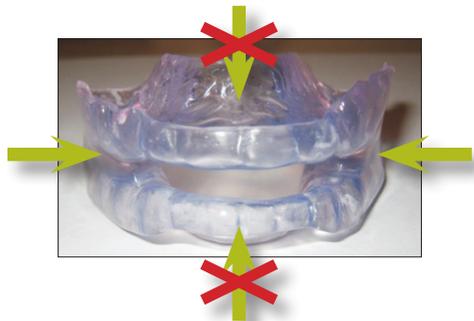

Reinigung der Damon Retainer :

Das Gerät täglich (morgens) einmal mit Zahnpasta und Zahnbürste putzen und mit kaltem Wasser abspülen. Nie heißes oder lauwarmes Wasser benutzen!!! Durch die Wärme verformt sich das Gerät und wir müssen ein neues anfertigen.