

Anweisungen für den Wrap-around

Gratuliere! Heute hast du das letzte Gerät deiner Behandlung bekommen. Es ist ein Retentionsgerät: der Wrap-Around, präzise angefertigt in unserem Labor. Hier erfährst du, wie du das Gerät richtig anwendest, damit alles gut klappt.

Wie wird das Gerät eingesetzt?

Fass das Gerät mit beiden Händen an beiden Seiten an und schiebe es über die Zähne im Oberkiefer. Sorge für die richtige Position der Drahtteile und beiße vorsichtig drauf.



Herausnehmen

Öffne den Mund. Gerät mit beiden Händen seitlich an den Drahtteilen anfassen und abnehmen. Wichtig ist, dass du es langsam und gleichmäßig tust. Nie das Gerät vorne runterziehen, dann machst du es kaputt und eine Reparatur wird teuer. Nach dem Herausnehmen mit kaltem Wasser abspülen und in einer Zahnspangendose aufbewahren.



Reinigung der Wrap-Around

Das Gerät täglich einmal (morgens) mit Zahnpasta und Zahnbürste putzen und mit lauwarmem Wasser abspülen. Ist das Gerät stark verschmutzt, bitte mit einer Braustablette für Prothesen reinigen.